



カラダライブ活動量計アップローダー アプリ操作マニュアル



1. インストールについて

アプリのインストール

QRコードを読み取って
インストール！

or

App Store又はGoogle Play
より検索！

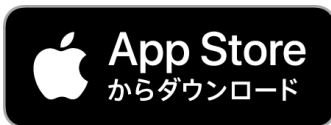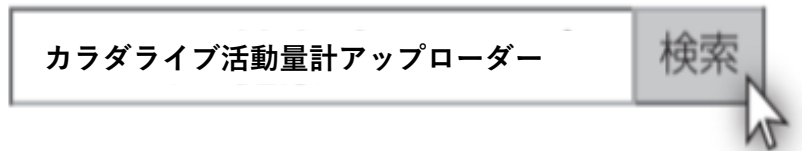

※Apple、Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です

ログインの手続き



ホーム画面に、
アイコンが表示されている
ことを確認しクリック



活動量計の箱に添付されているIDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。

万一IDとパスワードが不明の場合は、佐屋保健センターにお問い合わせください。

2. 歩数データ送信について (ios)

歩数データ送信方法



「歩数データ送信」をクリック




近接センサーに活動量計をかざします。

※機種によりセンサーが配置されている場所が若干異なる場合がございます。近接センサーの場所が不明な場合は、スマートフォンご購入時に付属されているマニュアル等でご確認ください。



この画面が表示されれば読み取り完了です。

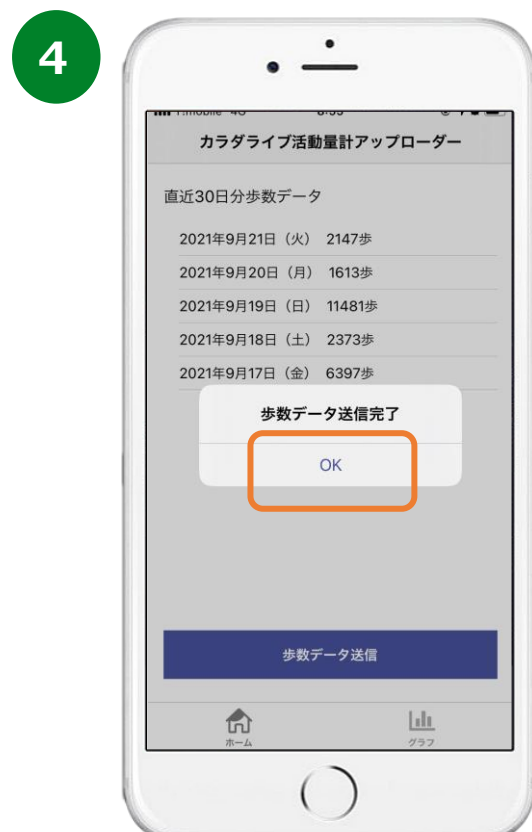


「OK」を押してホーム画面に戻ります
1度かざすと60分かざすことができません。

2. 歩数データ送信について (Android)

歩数データ送信方法

1

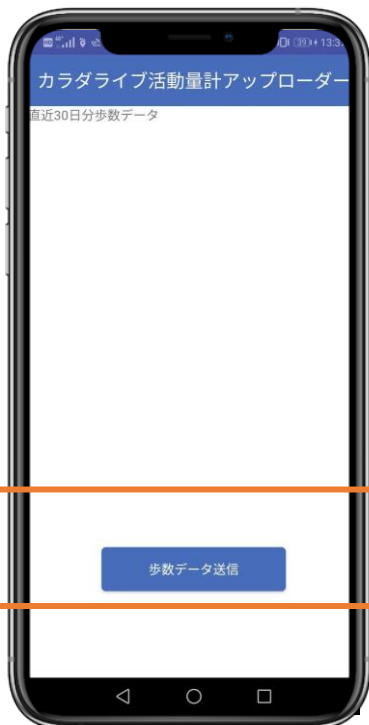

「歩数データ送信」をクリック


2



※機種によりセンサーが配置されている場所が若干異なる場合がございます。近接センサーの場所が不明な場合は、スマートフォンご購入時に付属されているマニュアル等でご確認ください。

裏面のモバイル非接触IC通信マーク部分にかざしてください。スマートフォンのケースを外すと、さらに読み取りやすくなります。

3

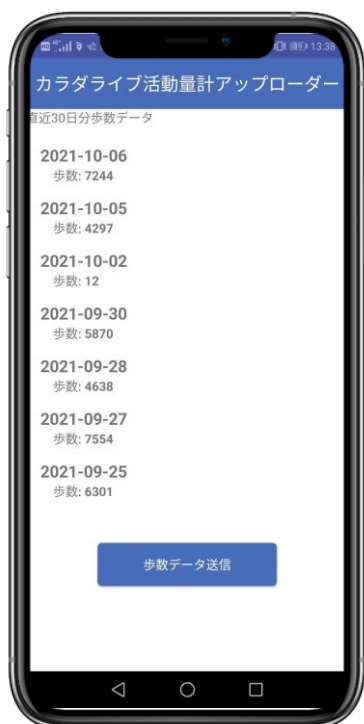

歩数が表示されれば完了です。